


— Kenotest™

EN
FR
NL
DE

DIRECTIONS OF USE · MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · ANWENDUNG

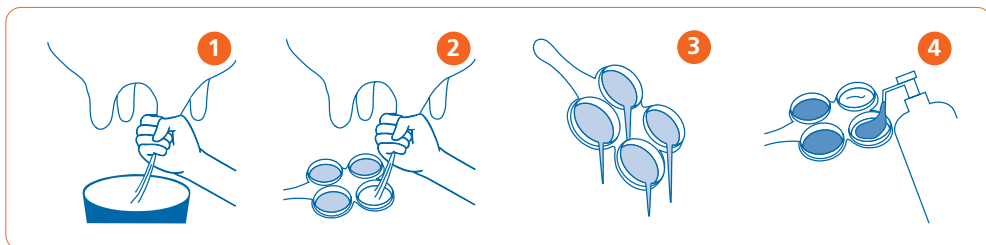

CMT	CCI (cells/ml)	Interpretation · Interprétation · Interpretatie · Beurteilung
-	0 - 200.000	EN Liquid mixture without gel FR Mélange liquide sans précipitation NL Vloeibare mengeling zonder gel DE Das Gemisch bleibt flüssig, kein Schlierenbildung
Suspicious infection · Suspicion d'infection · Waarschijnlijke infectie · Vermutlich Infektion		
0	200.000 - 500.000	EN Light gel visible by transparency, will disappear after 10 seconds FR Gel léger visible par transparence disparaissant après une dizaine de secondes NL Lichte doorzichtige gel die verdwijnt na een 10-tal seconden DE Das Gemisch zeigt leichte Schlierenbildung, verschwindet nach 10 Sekunden
1	500.000 - 1.000.000	EN Visible light gel by transparency, persistent FR Gel léger visible par transparence, persistant NL Lichte gel, doorzichtig en blijvend DE Das Gemisch zeigt leichte Schlierenbildung, persistent
Long lasting infection · Infection de longue durée · Langdurige infectie · Sehr Starke Infektion		
2	1.000.000 - 5.000.000	EN Visible gel, adhesion to the cup, visquous filament FR Gel visible et adhérence au fond en filaments visqueux NL Zichtbare gel, klevend DE Das Gemisch zeigt eine starke Schlierenbildung, klebend
3	> 5.000.000	EN Strong gel like the white of egg FR Gel épais comme du blanc d'oeuf NL Dikke gel (zoals eiwit) DE Das Gemisch zeigt eine aussergewöhnlich starke Schlierenbildung und eine feste Masse wie Eiweiss




CID LINES
An Ecolab Company

Fostering quality of life means caring for every stage of the cycle. Everywhere it matters, health means the world. And health, we believe, starts with hygiene. It's why at CID LINES - an Ecolab company - we devote all our passion, experience, and expertise to safeguarding animal health and hygiene. Because no matter where you are in the food chain, health matters. And this is **where health begins**.

**WHERE
HEALTH
BEGINS**

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper · Belgium · T +32 57 21 78 77 · F +32 57 21 78 79 · info@cidlines.com · www.cidlines.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INDICAȚII DE UTILIZARE · SPOSÓB UŻYCIA · ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

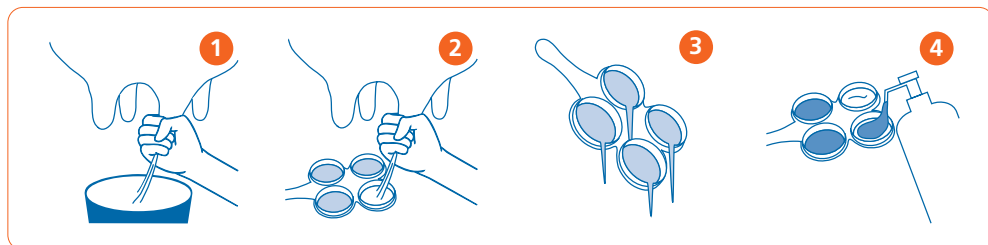

CMT	CCI (cells/ml)	Magyarázat · Interpretare · Interpretacja · Интерпретация
-	0 - 200.000	HU Folyékony keverék, zselésedés nélkül RO Amestec de lichid fără gel PL Płynna mieszanina bez żelu RU Жидкая смесь без геля
Fertőzés gyanú · Suspensiune infecție · Podejrzanie infekcji · Подозрение на инфекцию		
0	200.000 - 500.000	HU Kevés átlátszó zselé, mely 10 másodperc után eltűnik RO Gel translucid, va dispărea după 10 secunde PL Przezroczysta żelowata konsystencja zanika po 10 sekundach RU На просвет виден лёгкий гель, который исчезает через 10 секунд
1	500.000 - 1.000.000	HU Tartósan megmaradó zselé RO Gel translucid, persistent PL Trwała, żelowata przezroczysta konsystencja RU На просвет виден лёгкий гель, который не исчезает
Tartós fertőzés · Infecție cronică · Trwała infekcja · Долго длящаяся инфекция		
2	1.000.000 - 5.000.000	HU A pohár falához tapadó, viszkózus szálakat tartalmazó zselé RO Gel vizibil. Adeziune pe pahar- filament vâcos PL Widoczny żel przylegający do płytki, ciągnące się lepkie włókienka RU Видимый гель, прилипание к чашке, густые волокна
3	> 5.000.000	HU Tojásfehérjéhez hasonló zselé RO Gel vâcos asemeni albușului de ou PL Gęsty żel przypominający białko jajka RU Густой гель, похожий на белок яйца

