



BTN de Haas BV / btndehaas.nl "Agrarisch goed"

## STAPPENPLAN EN WERKWIJZE VOOR DE KENOTEST

1. Melk de eerste drie stralen uit iedere tepel speen weg.
2. Melk in elk kwartier van de mastitis testschaal ongeveer 2ml melk.
3. Voeg in elke gevulde cup van de testschaal 2ml Kenotest toe.
4. Meng ongeveer 15 seconden het pallet met cirkelvormige bewegingen.
5. Na 30 seconden wachten kunt u de resultaten van de celgetallen vergelijken met de tabel. U kunt nu ook vaststellen of de koe subklinische mastitis heeft of niet.
6. Na gebruik de pallet goed reinigen en afdrogen voor de volgende test.